

Fertőtlenítés

hygienicDES CAPS

Fertőtlenítőpor-koncentrátum


Terméknév

hygienicDES CAPS

Felhasználási területe

Fertőtlenítés

Termékleírás

Nagyon hatékony fertőtlenítőpor-koncentrátum, hiánytalan hatástartománnyal. Egyszeres adagoló egységek vízben oldódó fóliában a kényelmes, pormentes és biztonságos adagoláshoz a HAGLEITNER rendszerPALACKKAL. A fólia feloldódik a vízben, és 100% -ban mikro műanyag mentes. A gazdaságos adagolása és rövid hatásideje miatt optimálisan alkalmazható mindenféle felület rutinszerű fertőtlenítésére. Kiváló fertőtlenítéshez nagy szerves terhelések és jelentős fertőzések esetén, pl. norovírusok, rotavírusok és Clostridium difficile. Mentos továbbá aldehidtől, fenoltól ezért szagszegény, így különösen kényelmes felhasználást biztosít.

Csomagolási egység

400 g doboz (80 x 5 g)

Cikkszám: 4460101333

Hatóanyag

Percetsav (0,5%)

Alkalmazás | Felhasználási terület

Felületi fertőtlenítőszer kiváló tisztítóhatással és átfogó hatáskörrel. Hatékony baktériumok, spóráképző baktériumok, micobactériumok, élesztők, gombák és vírusok ellen (ideértve a vérben terjedő vírusokat, mint például HBV, HCV, HIV, influenzavírusok és norovírusok). A VAH / ÖGHMP / RKI kritériumok szerint megvizsgálták és regisztrálták jegyzésre. Széles körűen tesztelték a legújabb EU szabványok szerint: EN 13697 (baktericid, élesztőtőrtő, fungicid), EN 13727 (baktericid), EN 16615 (4 mezős teszt), EN 13624 (fungicid, élesztőtőrtő), EN 14348 (mycobactericid), EN 17126 és EN 13704 (sporocid), EN 14476 (virucid). Vigye egyenletesen a használandó oldatot a tisztítandó felületre, és tartsa nedvesen azt a hatás ideje alatt. Használat után öblítse le csapvízzel. Különleges megjegyzés: Ne nyúljon nedves kézzel a dobozba!

Anyagkompatibilitás

A kész hygienicDES CAPS felhasználását a következő anyagokkal való kompatibilitásra tesztelték:

ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexi, PVC, ABS, PE-HD (Hostalen), PA, poliszulfon, teflon, linóleum padló, gumi padló, vinil padló, acél (rozsdamentes acél)





Fertőtlenítés

hygienicDES CAPS

Fertőtlenítőpor-koncentrátum

Alumíniumon és színesfémen történő alkalmazáskor az anyag kompatibilitását előre meg kell vizsgálni egy észrevétlen helyen. Az oldat polikarbonáton történő alkalmazása nem javasolt.

Adagolás

1 hygienicDES CAP HAGLEITNER rendszerPALACK 5g/L koncentrációnak felel meg. Helyezze a szükséges mennyiségű hygienicDES CAPS-t (az adagolási táblázat szerint) egy 1 literes rendszerPALACKBA és töltsé fel azt hideg csapvízzel. A palack többszörös rázásával a CAP feloldódik a vízben, és perecetsav hatóanyag képződik. 15 perc elteltével a SafetyWIPES vagy a SafetyMOPS átitatható a kész oldattal. A kendőket 8 órán keresztül lehet felhasználni.

Adagolási táblázat

Vizsgálati norma	Hatóidő	Adagolás	Csíra	Terhelés:
EN 13697	5 perc*	1 CAP/L	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	magas
EN 13727	5 perc*	1 CAP/L	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli	magas
EN 16615	5 perc*	1 CAP/L	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans	magas
EN 13697	5 perc*	1 CAP/L	Enterococcus hirae, Candida albicans	magas
EN 13624	15 perc	2 CAP/L	Candida albicans	magas
EN 14348	30 perc	4 CAP/L	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium	magas



Fertőtlenítés

hygienicDES CAPS

Fertőtlenítőpor-koncentrátum

EN 14348	120 perc	2 CAP/L	Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium	magas
EN 17126	15 perc	4 CAP/L	Clostridium difficile	magas
EN 17126	30 perc	2 CAP/L	Clostridium difficile	magas
EN 17126	60 perc	1 CAP/L	Clostridium difficile	magas
EN 13704	20 perc	1 CAP/L	Clostridium difficile, Bacillus subtilis	csekély
EN 14476	5 perc*	1 CAP/L	Adenovírus, rotavírus, norovírus (MNV)	magas
EN 14476	30 perc	2 CAP/L	Poliovírus	magas
EN 14476	5 perc	2 CAP/L	Poliómavírus SV40	magas
EN 14476	15 perc	1 CAP/L	Poliómavírus SV40	magas
EN 13697	15 perc	4 CAP/L	Aspergillus brasiliensis	magas
EN 13624	30 perc	2 CAP/L	Aspergillus brasiliensis	magas
EN 16615	60 perc	2 CAP/L	Aspergillus brasiliensis	magas

* napi rutin fertőtlenítéshez: 1 CAP/L 5 perc hatásideővel

Figyelmeztetés

Vegyszerek alkalmazásakor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. **A fertőtlenítőszert biztonságosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt olvassa el a termékismertetőt.** Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tárolás

Minőségi okokból lezárva és szárazon, szobahőmérsékleten tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Termékajánlás

Annak elkerülése érdekében, hogy a baktériumok elterjedjenek a fertőtlenítő oldatban, javasoljuk a hygienicDES CAPS használatát a HAGLEITNER biztonsági termékekkel kombinálva: SafetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL. Az első használat előtt feltétlenül mossa ki a biztonsági törlőket!

Fertőtlenítés

hygienicDES CAPS

Fertőtlenítőpor-koncentrátum

Értékesítési egység

Doboz

EU raklap

288 darab